



# 전

# 후

235mm

제인 08-306호
의료기기 | 멸균제품 | 일회용 | 재사용금지

## 메디폼® H밴드

**[형상 및 구조]**  
본 제품은 창상의 오염을 방지하고 상처보호를 목적으로 사용되는 하이드로콜로이드 형태의 점착성 창상피복재로 반투과성으로 수분증발을 조절해 주는 폴리우레탄 필름 외부층과 상처접촉면으로 점착특성이 있으며 창상부위의 분비물을 흡수하고 상처를 보호하는 하이드로콜로이드층으로 구성되어 있습니다. 본 제품은 제품 자체에 점착력이 있어 사용이 용이하며 창상피복재 제거 시 상처에 들러붙지 않습니다.

**[사용목적]**  
창상의 오염 방지 및 보호

**[사용 및 조작 방법]**  
가. 사용 전의 준비사항  
1) 본 제품의 유효기간이 유통기간 내에 있는지 확인하고 포장에 손상이 있거나, 제품이 오염되었는지를 확인한 후 유효기간이 경과하였거나, 손상 및 오염이 있는 제품은 사용하지 않습니다.  
2) 상처를 물이나 생리식염수로 씻고 완전히 건조시킵니다.  
3) 피부가 깨끗한지 확인하고, 건조 후 크림이나 로션을 바르지 않습니다.  
4) 사용설명서를 잘 읽은 후 사용합니다.

나. 사용방법 및 조작순서  
1) 상처부위의 크기보다 큰 사이즈의 제품을 선택한 후 제품의 점착제가 붙은 면의 박리지(이형지)를 제거 후 상처부위에 부착합니다.  
2) 상처에 적용 후 잘 붙을 수 있도록 눌러줍니다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법  
1) 본 제품은 멸균 처리된 일회용 제품이므로 재사용을 금합니다.  
2) 직사광선이나 습기가 있는 장소를 피해 보관합니다.

**[사용시 주의사항]**  
1) 감염된 상처(빨갳게 되었거나, 농이 있거나, 열이 있거나, 부종 등의 이상이 나타나는상처)에는 사용하지 않습니다.  
2) 깊은 상처, 근육, 뼈 또는 건(힘줄)이 보이는 상처에는 사용하지 않습니다.  
3) 본 제품의 사용 중 발진, 발열, 알레르기 반응이나 감염증상이 있을 경우에는 사용을 금하고, 의사나 약사의 지시에 따라 적절한 치료를 받으록 합니다.

**제조사**  
Genevel (주)제네웰 의성지사  
경기도 화성시 향남읍 솔태상동길 281-2  
www.genevel.com

**판매자**  
한국먼디파마(유)  
서울특별시 중구 한강대로 416  
서울스퀘어 3층  
제품문의처 080-800-5689  
www.medifoam.co.kr

100mm

제인 08-306호
의료기기 | 멸균제품 | 일회용 | 재사용금지

## 메디폼® H밴드

4) 본 제품은 일회용 제품이므로 재사용을 금하고 또한 멸균 포장지가 찢어져 있거나 개봉되어 있을 경우에는 감염의 우려가 있으므로 사용하지 않습니다.

**[저장방법]**  
1) 밀봉용기, 실온(1~30°C) 보관합니다.  
2) 직사광선 및 고온 다습한 장소를 피해 보관합니다.

**[품목명]** 국소하이드로겔창상피복재  
**[모델명]** 별도표기  
**[사용기한]** 별도표기  
**[포장단위]** 별도표기

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 및 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

®: 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.

첨부문서 작성년월 : 2019년 01월  
[Rev. 00]

**제조사**  
Genevel (주)제네웰 의성지사  
경기도 화성시 향남읍 솔태상동길 281-2  
www.genevel.com

**판매자**  
한국먼디파마(유)  
서울특별시 중구 한강대로 416  
서울스퀘어 3층  
제품문의처 080-800-5689  
www.medifoam.co.kr