

패키지는 내용물 보호 및 운반의 1차적 기능 이외에 메디폼의 홍보 및 이미지를 전달하는 중요 프로모션 아이템이다. 포장박스는 종이 인쇄에 코팅으로 제작하며, 수출용패키지는 4도 인쇄를 기본으로 한다. 메디폼의 이미지 상승효과를 위해 가능한 재질로 제작하며, 내용물의 크기에 따라 비례 및 크기를 조정하여 사용할 수 있다. 모든 원고의 확대, 축소 또는 재생은 Adobe Illustrator레이터 데이터에 의한 복제를 원칙으로 한다.

메디폼밴드 액상 - 메디폼리퀴드 사용설명서

전

후

150mm

제인 09-512호
의료기기

메디폼® 리퀴드

[형상 및 구조]
본 제품은 창상피복재로 폴리우레탄(polyurethane)을 주성분으로 하고 휘발성분인 알코올과 에틸아세테이트를 용매로 하여 구성된 액상의 투명 혹은 반투명의 제품으로, 창상에 도포하면 휘발성분이 빠르게 휘발되어 탄성을 갖는 얇은 폴리우레탄 필름막이 형성되어 창상의 오염방지 및 보호하는 역할을 제공합니다. 또한 방수 특성으로 물과 접촉 시 창상면을 수분의 침투로부터 보호합니다.

[사용목적]
창상의 오염 방지 및 보호

[사용방법]
가) 사용 전의 준비사항
1) 상처(환부)를 깨끗이 한 후 사용합니다.
2) 사용설명서를 잘 읽은 후 사용합니다.
나) 사용방법 및 조작순서
1) 상처부위 및 적용부위를 깨끗이 합니다. (이물질 등 제거)
2) 본 제품을 상처부위보다 약간 넓게, 균질하고 얇게 발라줍니다. (상처부위가 약간 딱딱할 수 있습니다.)
3) 본 제품의 도포된 부분이 잘 마르도록 건조시킵니다. (바람을 이용하면 더욱 효과적으로 건조됩니다.)
4) 마른 후 일정시간 경과 후에는 가장자리가 허얇게 일어나는 현상이 발생되며, 이 때 교환하고 싶으시면 가장자리부터 떼어내 주시고, 더 유지하고 싶으시면 그 위에 재도포하여 주십시오.
다) 사용 후 보관 및 관리방법
본 제품은 휘발성분이 함유되어 투경을 완전히 밀폐시키지 않을 경우 공기 중에 노출되어 제품이 굳을 수 있으므로 사용 후 남은 제품은 즉시 밀폐하여 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관합니다.

[사용시 주의사항]
1) 일반적 주의사항
① 보관은 45℃ 이하에서 보관해 주십시오. (45℃ 이상에서는 파손의 우려가 있습니다.)
② 의식적으로 내용물을 흡입하지 않도록 해 주십시오.
③ 도포한 제품이 마르기 전에는 도포한 상처부위를 물에 닿게 하지 않습니다.
④ 손바닥이나 발바닥 등 유분이 많은 부위에 도포하시면 쉽게 벗겨질 수 있습니다.
⑤ 상처에 바른 후 완전히 마른 후부터 움직여 주십시오.
⑥ 본 제품을 사용하여 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 있을 경우 사용을 중지하고 피부과 전문의 등에게 상담하십시오.

제조사
Genewel (주)제네웰 약성지사
경기도 화성시 향남읍 솔태상동길 281-2
www.genewel.com

판매자
한국먼디파마(유)
서울특별시 중구 한강대로 416번지
서울스퀘어 3층
제품문의처 080-800-5689

제인 09-512호
의료기기

메디폼® 리퀴드

2) 금기사항
①눈 ②흡입 및 복용 ③점액질의 세포막 ④고름이 있는 상처

[품목명] 점착성투명창상피복재
[모델명] MSP8
[저장방법] 고온다습한 장소 및 직사광선이 쏘이는 장소를 피하여 실온 보관합니다.
[사용기한] 별도표기
[포장단위] 1Unit/1Box

Ⓜ : 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.

첨부문서 작성년월 : 2018년 4월
Rev. 02

제조사
Genewel (주)제네웰 약성지사
경기도 화성시 향남읍 솔태상동길 281-2
www.genewel.com

판매자
한국먼디파마(유)
서울특별시 중구 한강대로 416번지
서울스퀘어 3층
제품문의처 080-800-5689

100mm