



전

후

제인 08-306호

의료기기
멸균제품
일회용
재사용금지

메디폼[®] H

[형상 및 구조]
본 제품은 창상의 오염을 방지하고 상처보호를 목적으로 사용되는 하이드로콜로이드 형태의 점착성 창상피복재로 반투과성으로 수분증발을 조절해 주는 폴리우레탄 필름 외부층과 상처접촉면으로 점착특성이 있으며 창상부위의 분비물을 흡수하고 상처를 보호하는 하이드로콜로이드층으로 구성되어 있습니다. 본 제품은 제품 자체에 점착력이 있어 사용이 용이하며 창상피복재 제거 시 상처에 들러붙지 않습니다.

[사용목적]
창상의 오염 방지 및 보호

[사용방법]
가. 사용 전의 준비사항
1) 본 제품의 유효기간이 유통기간 내에 있는지 확인하고 포장에 손상이 있거나, 제품이 오염되었는지를 확인한 후 유효기간이 경과하였거나, 손상 및 오염이 있는 제품은 사용하지 않습니다.
2) 상처를 물이나 생리식염수로 씻고 완전히 건조시킵니다.
3) 피부가 깨끗한지 확인하고, 건조 후 크림이나 로션을 바르지 않습니다.
4) 사용설명서를 잘 읽은 후 사용합니다.
나. 사용방법 및 조작순서
1) 상처부위의 크기보다 큰 사이즈의 제품을 선택한 후 제품의 점착제가 붙은 면의 박리지를 제거 후 상처부위에 부착한다.
2) 상처에 적용 후 잘 붙을 수 있도록 눌러준다.
다. 사용 후 보관 및 관리방법
1) 본 제품은 멸균 처리된 일회용 제품이므로 재사용을 금합니다.
2) 직사광선이나 습기가 있는 장소를 피해 보관합니다.

[사용시 주의사항]
1) 감염된 상처(빨갳게 되었거나, 농이 있거나, 열이 있거나, 부종 등의 이상이 나타나는 상처)에는 사용하지 않습니다.
2) 깊은 상처, 근육, 뼈 또는 건(힘줄)이 보이는 상처에는 사용하지 않습니다.
3) 본 제품의 사용 중 발진, 발열, 알레르기 반응이나 감염증상이 있을 경우에는 사용을 금하고, 의사나 약사의 지시에 따라 적절한 치료를 받도록 합니다.
4) 본 제품은 일회용 제품이므로 재사용을 금하고 또한 멸균 포장지가 찢어져 있거나 개봉되어 있을 경우에는 감염의 우려가 있으므로 사용하지 않습니다.

제조사
Genevel (주)제네웰 파성지사
경기도 화성시 향남읍 송태상두길 281-2
www.genevel.com

판매자
mundapharma 한국먼디파마(유)
서울특별시 중구 한강대로 416
서울스퀘어 3층
제품문의처 080-800-5689
www.medifoam.co.kr

제조사
Genevel (주)제네웰 파성지사
경기도 화성시 향남읍 송태상두길 281-2
www.genevel.com

판매자
mundapharma 한국먼디파마(유)
서울특별시 중구 한강대로 416
서울스퀘어 3층
제품문의처 080-800-5689
www.medifoam.co.kr

제인 08-306호

의료기기
멸균제품
일회용
재사용금지

메디폼[®] H

[제품명] 메디폼 H, 메디폼 H 밴드
[품목명] 국소하이드로겔 창상피복재
[모델명] 별도표기
[저장방법] (1) 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관합니다.
(2) 직사광선이나 고온 다습한 장소를 피해 보관합니다.
[사용기한] 별도표기
[포장단위] 별도표기

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 및 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다

®: 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.

제조사
Genevel (주)제네웰 파성지사
경기도 화성시 향남읍 송태상두길 281-2
www.genevel.com

판매자
mundapharma 한국먼디파마(유)
서울특별시 중구 한강대로 416
서울스퀘어 3층
제품문의처 080-800-5689
www.medifoam.co.kr

273mm

120mm

첨부문서 작성년월: 2018년 11월
Rev. 03